

**Čistý obsah:** IMS-1226: Láhev 3,8 l

**Návod k použití:** Před použitím dobře protřepejte. Používejte gumové rukavice a ochranné brýle. Doporučená teplota vody: 32 až 60 °C. Voda: Nejlépe demineralizovaná voda. **Namáčení:** Přidejte 30 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody / 1 sáček (10 ml) vystačí na 3,5 litru vody. Namáchejte 3–5 minut. Důkladně opláchněte. **Namáčení prádla:** Přidejte 60 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody. Oděvy nechejte namáčet 10 minut. Na závěr vyperte běžným způsobem. **Ultrazvukové čištění:** Přidejte 30 ml koncentrátu do 3,8 l vody / 1 sáček (10 ml) vystačí na 3,5 litru vody. Po vyčištění důkladně opláchněte a nechejte uschnout. **Odsávací zařízení:** Přidejte 60 ml přípravku Enzymax do 3,8 l vody. Připojte odsávací hadičku a nechejte systém naplno běžet jednu minutu. Doporučení: Ošetření provádějte dvakrát týdně. Na závěr nástroj vydezinfikujte, důkladně opláchněte, osušte a proveďte sterilizaci.  
– Přípravek Enzymax nemíchejte s dezinfekčními prostředky a nepoužívejte v termodezinfektorech. Roztok Enzymax vyměňujte alespoň jednou denně.



UFI: UKDK-RW4N-PA02-PJP5

## DANGER

**H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H334** Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. **P342+P311** Při dýchacích potížích: Volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **Bezpečnostní údaje:** Obsahuje subtilisin, amylázu, alfa - může vyvolat alergické reakce. Prázdné obaly likvidujte v souladu s místními a národními předpisy. **Bezpečnostní list** je k dispozici na vyžádání nebo na webu: [www.hu-friedy.eu](http://www.hu-friedy.eu).

**Telefonní číslo pro případ nouze:** ZE ZAHRANIČÍ: +49 (0)6132 84463, GBK GmbH (24 hodin denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce) / Německo: 06132 84463 (24 hodin denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce).

**Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

3232 N. Rockwell St. | Chicago IL 60618

**Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.** Zweigniederlassung Deutschland

Kleines Öschle 8 | D-78532 Tuttlingen

Tel: 00800 48 37 43 39 | Fax: 00800 48 37 43 40

[www.hu-friedy.eu](http://www.hu-friedy.eu) | [info@hu-friedy.eu](mailto:info@hu-friedy.eu)