

PL IMS-1455 Shine reNEW Instrument Wipes

20 chusteczek: do czyszczenia, polerowania i ochrony instrumentów. Usuwa plamy, rdzę, osady wodne i naloty. Bezpieczne użycie na stali nierdzewnej, miedzi, mosiądzu, miedzi i anodyzowanym aluminium.

Instrukcja użycia: Otworzyć pokrywę, ścisnąć kanister i wyciągnąć pokrywę bezpośrednio do góry, aby zdjąć całą pokrywę z kanistra. Ściągnąć plombę i wyrzucić. Umieścić chusteczkę w środku rolki, zwinąć ją i przeciągnąć przez mały otwór w pokrywie. Założyć pokrywę i wyciągnąć przez nią chusteczkę. Pomiedzy kolejnymi zastosowaniami zawsze zatrząskiwac pokrywę, szczelnie ją zamykając, aby zapobiec utracie wilgoci. Aby usunąć plamy, założyć rękawiczki i pocierać miejsce zaplamienia szmatką, aż plama nie będzie już widoczna. W przypadku silnie zabrudzonych miejsc należy pocierać obszar z większym naciskiem. Po użyciu umyć i wysterylizować instrument zgodnie z normalną procedurą przygotowania instrumentu. Nie używać na złotych pierścieniach lub instrumentach z czarnym uchwytem (węglík wolframu lub SuperCut).



UFI: JFEK-TW1M-RA00-9YGT

ZAGROŻENIE

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **P280** - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. **P305+P351+P338** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310** - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem. **Zawiera:** Alkohole, drugorzędowe C12-14, etoksylogowane

Karta charakterystyki substancji (SDS) dostępna na żądanie lub na stronie: www.hu-friedy.eu **Numer telefonu alarmowego:** MIĘDZY Narodowy: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) w Polsce: 112

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

3232 N. Rockwell St. | Chicago IL 60618

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Zweigniederlassung Deutschland

Kleines Öschle 8 | D-78532 Tuttlingen

Tel: 00800 48 37 43 39 | Fax: 00800 48 37 43 40

www.hu-friedy.eu | info@hu-friedy.eu

 **HuFriedyGroup**